


Лесен и бърз начин да споделите резултатите от кръвната си захар с Вашия медицински специалист

Използвайте CONTOUR®DIABETES app и се свържете дистанционно с Вашия медицински специалист*

1

Изтеглете
CONTOUR®
DIABETES app

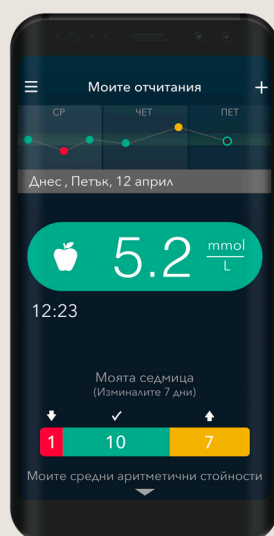

Безплатно изтегляне



Свали от
App Store

ПРЕДЛАГА СЕ В
Google Play

*За списък на съвместимите устройства посетете compatibility.contourone.com

2

Създайте
акаунт



3

Сдвоете Вашия
съвместим CONTOUR®
глюкомер




За повече
информация посетете:
diabetes.ascensia.com

Лесно присъединяване, за да се даде възможност за отдалечена оценка на кръвната захар от Вашия медицински специалист

Изчакайте поканата от вашия медицински специалист

Покана чрез имейл или Покана чрез QR код

Получавате покана по имейл и щраквате върху линка*

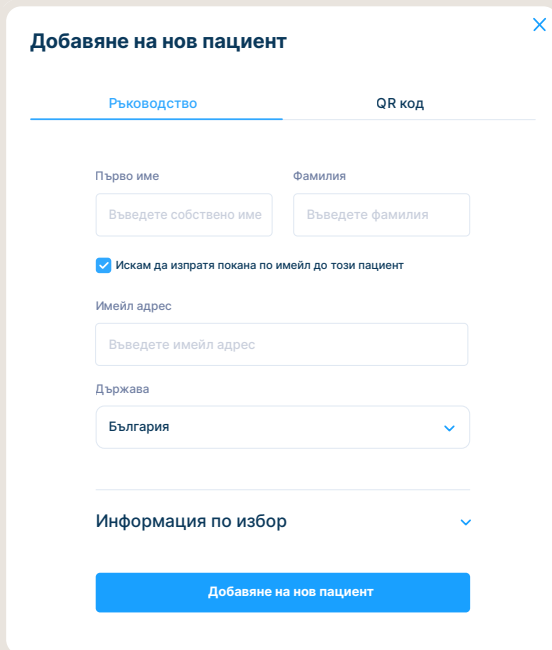

Добавяне на нов пациент

Ръководство | QR код

Първо име:

Фамилия:

Искам да изпратя покана по имейл до този пациент

Имейл адрес:

Държава:

Информация по избор

Добавяне на нов пациент

*Медицински специалист, който да иницира поканата



Ascensia Diabetes Service:


+359 2 9658 100

(понеделник-петък, от 09:00 до 17:00)

ascensia@phoenixpharma.bg


www.diabetes.ascensia.bg

1 Сканирайте QR кода, генериран по време на посещението

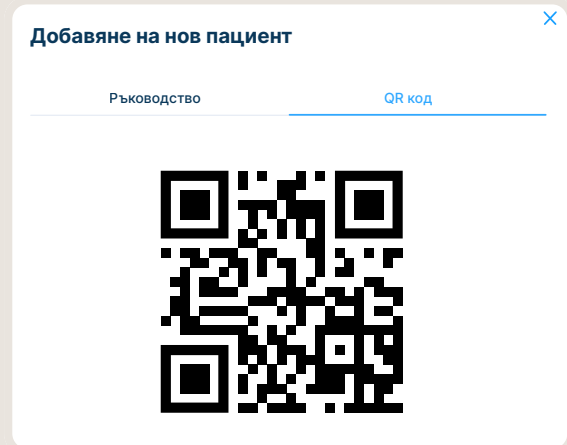


Добавяне на нов пациент

Ръководство | QR код

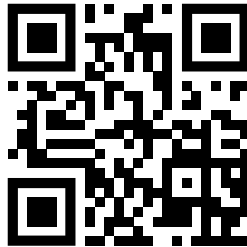

2 Влезте с вашето потребителско име и парола за CONTOUR®DIABETES app

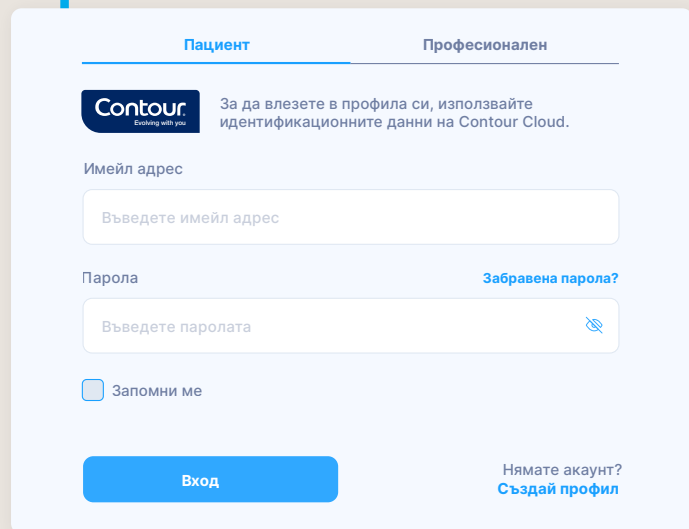

Пациент | Професионален

Contour Living with you За да влезете в профила си, използвайте идентификационните данни на Contour Cloud.

Имейл адрес:

Парола: [Забравена парола?](#)

Запомни ме

Вход

Нямате акаунт? [Създай профил](#)

3 Попълнете информацията си



Сега Вашите данни за кръвната захар са достъпни за Вашия медицински специалист чрез GlucoContro.online